

SQL Pulse Lavage System 5000



Stänkskydd inkluderat.


Sugkonstruktion som
minimerar risken för stopp.

Splittersäkert spolspröt och sugkonstruktion.

PVC-, ftalat- och latexfria spolset.
Endast miljövänliga material.

Polyuretanslang minimerar
risken för blockerat flöde.

SQL Pulse Lavage levererar:
optimal rengöringseffekt,
pulsfrekvens, pulsstyrka
och flöde.

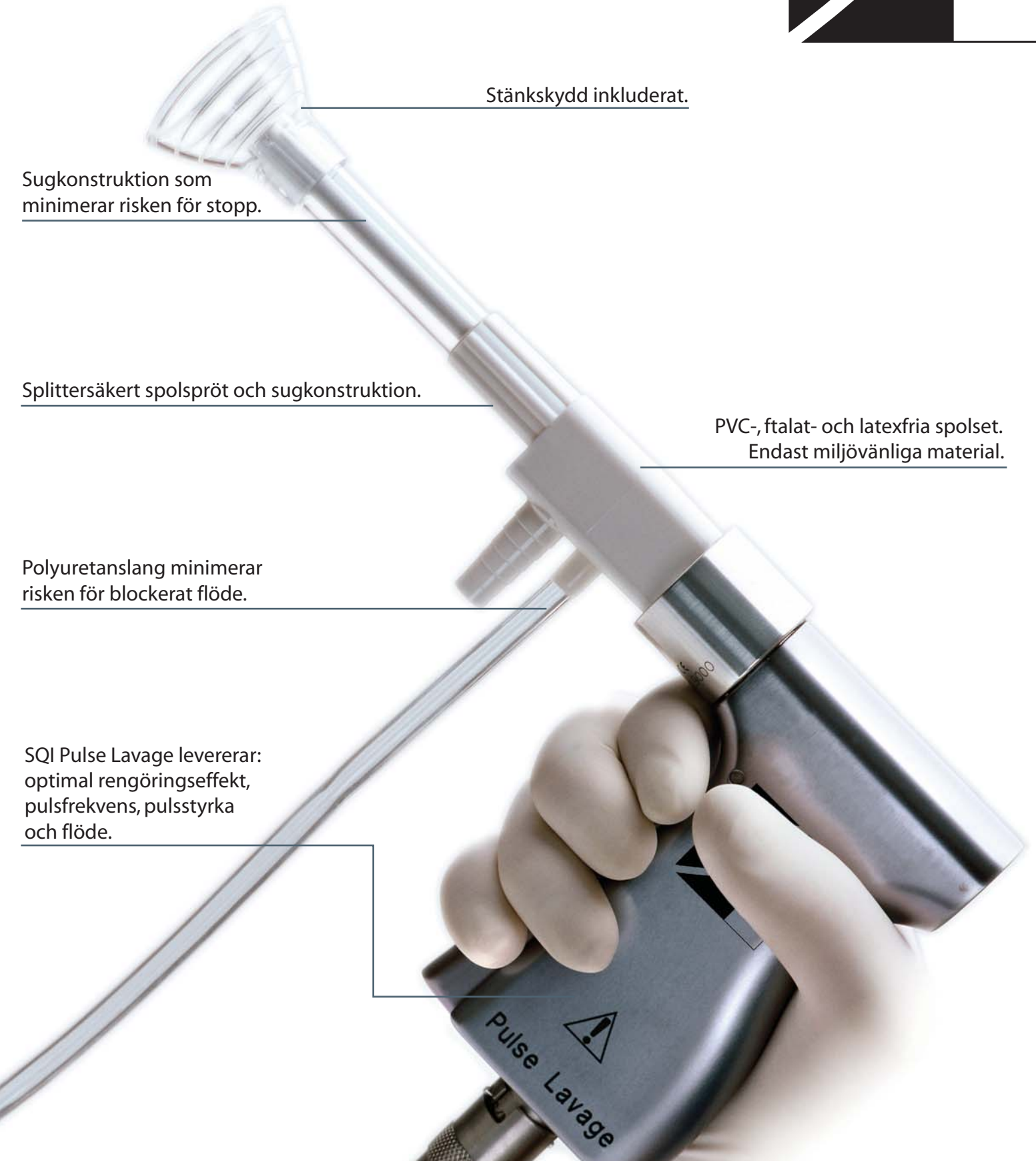

Swedish Quality Instruments

Fördelar:

Goda materialegenskaper

Flexibla och splittersäkra spolspröt och sugspröt vilket minimerar risken för intraoperativt splitter. Alla spolset är tillverkade av PVC-, ftalat- och latexfria material.



Genomtänkt design

Design som förhindrar stopp i sugkanalen (minsta kanalbredd vid kanalens början).

Optimerade egenskaper

SQI Pulse Lavage systemet levererar: optimal rengöringseffekt, pulsfrekvens, pulsstyrka och flöde. Egenskaper som ger bästa möjliga preparering av benbädden och rengöring av operationssåret.



Mindre avfall

Istället för att kasta hela pulse lavage systemet, så återanvänds handtaget. Vilket resulterar i att minska riskavfallet med mer än 80% jämfört med batteridrivna pulse lavage system.

Instruktioner:



1) Läs instruktioner.

Koppla ihop luftslang och maskin.

2



3) Reglera tryckluften till 5-7 kg/cm².

Koppla ihop spolset och maskin.

4



5) Koppla på sugslang (tillbehör för sugset).



Koppla 'spiken' till koksaltspåsen.

6

7) Klar att använda.



Tillslut irrigationsslangen när systemet inte används.

8



Pulse Lavage

L5000	SQI Pulse Lavage Maskin
FL1014	SQI Pulse Lavage Luftslang

Spolset

P5000SQI	SQI Pulse Lavage Höftset
P5001SQI	SQI Pulse Lavage Knäset
P5100SQI	SQI Pulse Lavage Höftset med sug
P5200SQI	SQI Pulse Lavage Mjukvävnadsset

Tillbehör

FL1611	SQI Pulse Lavage Diskadapter
OMP-100-091	SQI Pulse Lavage Slangclips, 1 par

*Stänkskydd och slangclips är inkluderat med alla spolset.



Tillverkat för:
SQI Swedish Quality Instruments AB
Stabbyallé 2
752 29 Uppsala
SWEDEN
tel: +46-18-55 55 05
fax: +46-18-51 50 50
web: www.sqi.se

Tillverkat av:
Oy Fluorplast AB
Västervägen 8
66240 Petalax
FINLAND

